



Detergent dezinfectant spuma Oxivir Excel W3141, 750 ml

Pret: 32⁴³ RON (fara TVA)

Disponibilitate: Comanda speciala

Descriere

Detergent dezinfectant spuma Oxivir Excel W3141, 750 ml

Detergent si dezinfectant pentru suprafetele dispozitivelor medicale non-invazive si suprafete neporoase.

Oxivir Excel detergent si dezinfectant combinat de la Diversey, **cu tehnologia AHP**, va ofera cea mai buna alternativa la dezinfectantii traditionali, **oferind eficacitate virucida completa in doar 30 de secunde**, fiind in acelasi timp foarte delicat cu suprafetele si prezentand cel mai redus risc pentru personalul si clientii dumneavoastra.


Ingredientul activ, peroxidul de hidrogen, se descompune in apa si oxigen la numai cateva minute dupa utilizare, fara a lasa reziduri potential daunatoare sau care ar putea modifica aspectul suprafetei.

Proprietati de baza:

- [?] Eficacitate virucida completa in numai 30 de secunde;**
- [?] Cea mai rapida actiune de pe piata impotriva unui spectru larg de virusuri, bacterii si levuri;**
- [?] Curatare superioara cu sistem de agenti tensioactivi de inalta performanta;**
- [?] Nu contine parfum;**
- [?] Nu necesita clatire;**

❓ Mai sigur atat pentru mediu, cat si pentru utilizatori, deoarece ingredientele active se descompun in apa si oxigen, spre deosebire de AFE, ENF si COV.

% murdărie îndepărtată într-un test standard de curățare

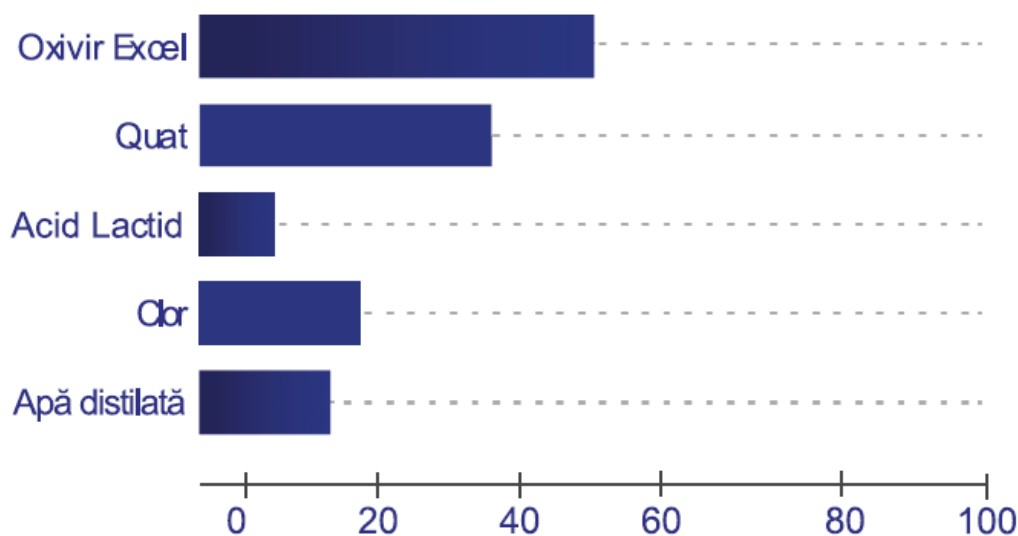

Sursa: Studiu intern, 2015

Avantaje:

- ❓ Eficacitatea cu spectru larg asigura **cele mai ridicate niveluri de dezinfectie**.
- ❓ Testat extensiv conform standardelor europene si eficace impotriva mai multor agenti patogeni de interes, este declarat ca fiind complet virucid inclusiv impotriva poliovirusului, adenovirusului si norovirusului Murin, considerat eficace impotriva tuturor virusurilor incapsulate precum: HIV, HBV, HCV, virusul gripal, virusul Vaccinia si coronavirusuri;
- ❓ Sigur pentru utilizatori, nu necesita EIP. **Fara clasificare de pericol;**
- ❓ **Performanta superioara de curatare si de 10 ori mai rapid** decat dezinfectantul dumneavoastra obisnuit;
- ❓ **Formula AHP este delicata cu suprafetele**, prelungind durata de viata a echipamentelor. Fara reziduri;
- ❓ Potrivit pentru utilizare in zone de risc din domeniul Retail, Educatie, Sanitar si alte sectoare;

[?] Sporește gradul de conformitate a dezinfectiei cu 35%.

AVANTAJE CHEIE



EFICACITATE

Eficacitate virucidă completă în doar 30 de secunde (Coronavirus)
Cea mai rapidă acțiune împotriva unui spectru larg de virusuri, bacterii și levuri



SIGURANȚĂ

Siguranță pentru utilizatori, nu este nevoie de EIP
Compatibilitate ridicată cu suprafețele, neinflamabil
Șervețelele reduc complet aerosolii și vor crește gradul de conformitate al dezinfectiei cu 35%*



EFICIENȚĂ

Produs de curățare și dezinfectare universal care îmbunătățește eficiența muncii (disponibil în mai multe variante de ambalare și soluții de dozare).
Șervețelele Oxivir Excel vă vor crește eficiența cu până la 23%*
Ușor de utilizat cu instruire minimă necesară
Sistem de agenți tensioactivi de înaltă performanță care oferă rezultate superioare de curățare în comparație cu multe alte tehnologii de dezinfectare



DURABILITATE

Compuși activi se descompun în apă și oxigen, ceea ce este mult mai sigur atât pentru mediu, cât și pentru oameni
Produsele Oxivir nu conțin alchilfenol etoxilați (APE), nonilfenol etoxilați (NPE), compuși organici volatili (VOC)

* Weimke TL, et. al. Valoarea șervețelor dezinfectante gata de utilizare: Conformitate, timpul angajaților și costuri. Am J Infect Control. 2014; 42: 329-330

Instrucțiuni de utilizare:

Curățare și dezinfectare prin pulverizare:


1. Îndepărtați murdăria grosieră.
2. Aplicați pe suprafețe fie prin pulverizare pe laveta cu care stergeți și pe suprafețele de sters, fie aplicând direct pe suprafața folosind un flacon cu pulverizator.
3. După timpul de contact*, fie stergeți până la uscare, fie lăsați să se usuce.

Sistem cu servetele uscate de unică folosință:

1. Pregătiți Sistemul cu servetele uscate de unică folosință, pentru stergere, conform instrucțiunilor.
2. Îndepărtați murdăria grosieră.
3. Scoateți un servetel și stergeți suprafața.
4. După timpul de contact*, fie stergeți până la uscare, fie lăsați să se usuce.
5. Schimbați servetelul atunci când este vizibil murdar, când treceți la o altă zonă de curățat sau când nu mai umezește suprafața.

* Asigurați-vă ca suprafețele rămân ude pe durata timpului de contact.

Timp de uscare vs. timp de contact

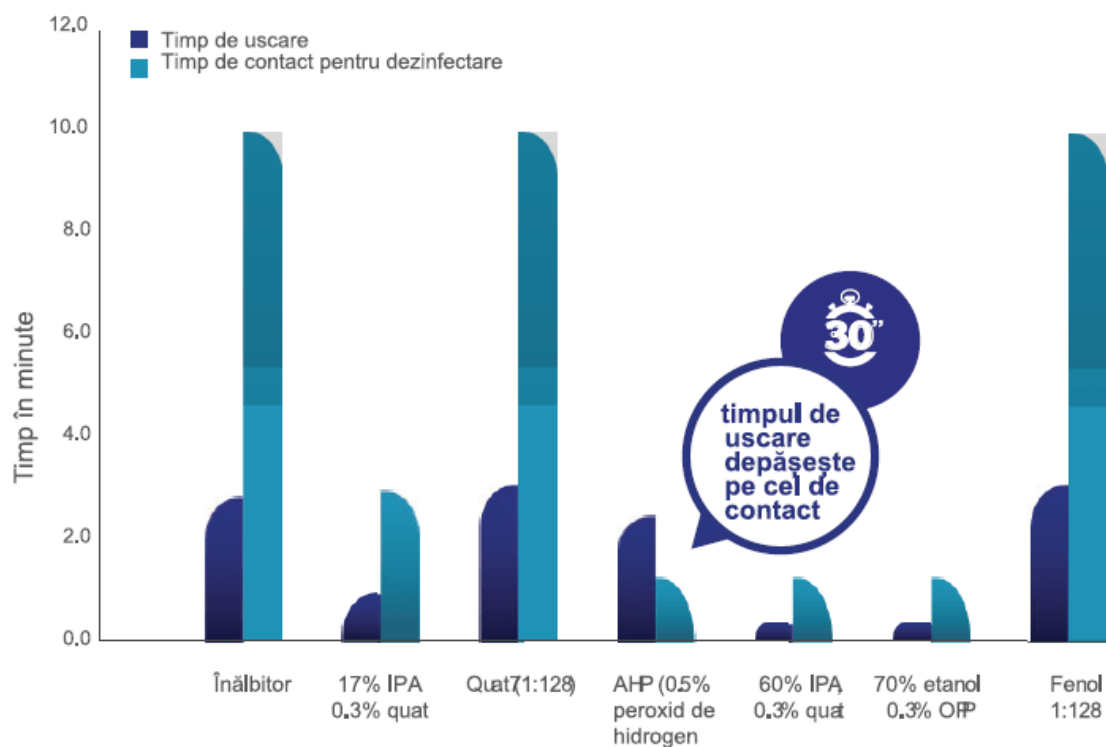

Sursa: J AOAC Int 2010 Noi-Dec; 93(6):1944-51

Date tehnice:

☐ Aspect: Lichid limpede, incolor;

☐ Miros: Neutru;

☐ Valoare pH (in soluție): 1,95;

☐ Densitate relativă (20 °C): 1,000;

☐ Termen de valabilitate: 720 zile;

*Datele de mai sus sunt tipice pentru producție normală și nu trebuie interpretate ca specificații.

Informații ecologice:

☐ Surfactantii utilizati in compozitia acestui produs indeplinesc cerintele de biodegradabilitate finala **in conformitate cu Regulamentul UE privind detergentii, CE 648/2004.**

Date microbiologice:

☐ Eficacitate dovedita prin conformitatea cu: **EN13727, EN13624, EN14476, EN13704**