

Masca 3 straturi IIR, 30buc, Dr. Albert



Pret: 8⁵⁵ RON (fara TVA)

Disponibilitate: Comanda speciala

Descriere

Masca 3 straturi IIR, 30buc, Dr. Albert

- 3 straturi / 3 pliuri cu elastic
- Eficiența filtrării $\geq 98\%$, rezistența la stropire
- EN 14683:2019 + AC:2019

COMPOZITIA PRODUSULUI:

Masca este formata din trei straturi de material textil netesut, 100% polipropilena.

Sistemul de fixare este format din **banda metalica, ajustabila** pe forma nasului, si **snururi/benzi elastice**.

DESCRIEREA PRODUSULUI:

Produsul este dispozitiv medical, **Clasa I, nesteril**.

Stratul interior are rol **filtrant**.

Materialele textile folosite sunt **compatibile cu pielea**: nu contin fibra de sticla, carbonat de calciu sau citotoxine.

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE:

- ❑ Înainte de a intra în contact cu produsul, spălați-vă mainile cu apă și sapun.
- ❑ Identificați banda metalică de fixare pe nas și orientați masca astfel încât banda să fie poziționată în partea de sus a mastii.
- ❑ Poziționați masca pe față, astfel încât **marginea pliurilor să fie orientată în jos**.
- ❑ Asezați masca pe față și duceti snururile elastice după urechi.
- ❑ Extindeți masca în aşa fel încât **sa acopere gura si baribia**.
- ❑ Dupa extinderea mastii, apasati banda metalica din zona nasului pentru a fixa masca.

INSTRUCTIUNI DE INLATURARE:

- ❑ Evitați atingerea celor 2 fețe ale mastii, manipularea mastii se va face cu ajutorul snururilor elastice.
- ❑ Prindeti cele 2 snururi elastice și înlaturați masca de pe față.
- ❑ Dupa înlaturarea ei aruncați masca folosită.
- ❑ Dupa aruncarea mastii, spălați-vă mainile cu apă și sapun, înainte de a atinge alte suprafete.

ATENTIONARI SI RECOMANDARI:

- ❑ Se recomanda ca **masca sa fie schimbata o data la 4 ore sau ori de cate ori aceasta s-a umedit sau s-a deteriorat**.
- ❑ Nu se recomanda utilizarea mastii intr-un mediu cu nivel scazut de oxigen sau in timpul somnului.
- ❑ Se recomanda **precautie** in utilizarea mastii in cazul persoanelor care **sufera de astm** sau alte **afectiuni respiratorii**.

INSTRUCTIUNI DE DEPOZITARE:

- ❑ A se proteja de lumina soarelui, umiditate si praf.

?

Se recomanda depozitarea intr-o **zona curata si uscata**.

?

Pentru depozitare se recomanda respectarea intervalului de temperatura de -20 °C si +25 °C si umiditate.

► **Masca certificata conform standard EN 14683:2019 AC:2019, certificare CE, ANMDMR si ISO 13485:2016 in conformitate cu Directiva CE 93/42/EEC, dar si de Hohenstein Laboratories Germania**

BENEFICII

1

ASIGURĂ O
RESPIRATIE
CONFORTABILĂ

2

NU AU MIROS ŞI
NU CONȚIN
SUBSTANȚE
INTERZISE

3

SUNT NEIRITANTE,
HIPOALERGENICE

4

SISTEMELE DE
PRINDERE SUNT
UŞOARE, IAR
BANDA CU FIR
METALIC ASIGURĂ
POZIȚIONAREA
CORECTĂ A
MÂȘTII

5

SUNT PRODUSE
EXCLUSIV DIN
MATERIAL
NETESUT, IAR
STRATUL INTERIOR
ESTE FILTRANT

**NU AU MIROS ŞI NU
CONȚIN SUBSTANȚE
INTERZISE**

