

Masca 3 straturi IIR, 30buc, Dr. Albert



Pret: 8⁵⁵ RON (fara TVA)

Disponibilitate: Comanda speciala

Descriere

Masca 3 straturi IIR, 30buc, Dr. Albert

- 3 straturi / 3 pliuri cu elastic
- Eficienta filtrarii $\geq 98\%$, rezistenta la stropire
- EN 14683:2019 + AC:2019

COMPOZITIA PRODUSULUI:

Masca este formata din trei straturi de material textil netesut, 100% polipropilena.

Sistemul de fixare este format din **banda metalica**, **ajustabila** pe forma nasului, si **snururi/benzi elastice**.

DESCRIEREA PRODUSULUI:

Produsul este dispozitiv medical, **Clasa I, nesteril.**

Stratul interior are rol **filtrant**.

Materialele textile folosite sunt **compatibile cu pielea**: nu contin fibra de sticla, carbonat de calciu sau citotoxine.

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE:

- ❑ Inainte de a intra in contact cu produsul, spalati-va mainile cu apa si sapun.
- ❑ Identificati banda metalica de fixare pe nas si orientati masca astfel incat banda sa fie pozitionata in partea de sus a mastii.
- ❑ Pozitionati masca pe fata, astfel incat **marginea pliurilor sa fie orientata in jos.**
- ❑ Asezati masca pe fata si duceti snururile elastice dupa urechi.
- ❑ Extindeti masca in asa fel incat **sa acopere gura si barbia.**
- ❑ Dupa extinderea mastii, apasati banda metalica din zona nasului pentru a fixa masca.

INSTRUCTIUNI DE INLATURARE:

- ❑ Evitati atingerea celor 2 fete ale mastii, manipularea mastii se va face cu ajutorul snururilor elastice.
- ❑ Prindeti cele 2 snururi elastice si inlaturati masca de pe fata.
- ❑ Dupa inlaturarea ei aruncati masca folosita.
- ❑ Dupa aruncarea mastii, spalati-va mainile cu apa si sapun, inainte de a atinge alte suprafete.

ATENTIONARI SI RECOMANDARI:

- ❑ Se recomanda ca **masca sa fie schimbata o data la 4 ore sau ori de cate ori aceasta s-a umezit sau s-a deteriorat.**
- ❑ Nu se recomanda utilizarea mastii intr-un mediu cu nivel scazut de oxigen sau in timpul somnului.
- ❑ Se recomanda **precautie** in utilizarea mastii in cazul persoanelor care **sufera de astm** sau alte **afectiuni respiratorii.**

INSTRUCTIUNI DE DEPOZITARE:

- ❑ A se proteja de lumina soarelui, umiditate si praf.

? Se recomanda depozitarea intr-o **zona curata si uscata**.

? Pentru depozitare se recomanda respectarea intervalului de temperatura de -20°C si +25°C si umiditate.

► **Masca certificata conform standard EN 14683:2019 AC:2019, certificare CE, ANMDMR si ISO 13485:2016 in conformitate cu Directiva CE 93/42/EEC, dar si de Hohenstein Laboratories Germania**

BENEFICII

- 1 ASIGURĂ O RESPIRAȚIE CONFORTABILĂ
- 2 NU AU MIROS ȘI NU CONȚIN SUBSTANȚE INTERZISE
- 3 SUNT NEIRITANTE, HIPOALERGENICE
- 4 SISTEMELE DE PRINDERE SUNT UȘOARE, IAR BANDA CU FIR METALIC ASIGURĂ POZIȚIONAREA CORECTĂ A MĂȘTII
- 5 SUNT PRODUSE EXCLUSIV DIN MATERIAL NETESUT, IAR STRATUL INTERIOR ESTE FILTRANT

**NU AU MIROS ȘI NU
CONȚIN SUBSTANȚE
INTERZISE**

