

Masca faciala de uz general, non medical, 50 buc/cut



Pret: 4⁷⁷ RON (fara TVA)

Disponibilitate: Comanda speciala

Descriere

Masca faciala de uz general, non medical, 50 buc/cut

Mastile faciale de uz general **sunt folosite ca bariera microbiana** in reducerea emisiilor de agenti infectiosi din nas si gura a unui purtator asimptomatic sau a unui pacient cu simptome clinice.

Mastile faciale de uz general corespund cerintelor SR EN 14683+AC:2019:

- ☐ Eficienta filtrarii bacteriene (BFE) $\geq 95\%$
- ☐ Respirabilitate (presiune diferentiala) < 40 [Pa/cm²]
- ☐ Incarcatura microbiana ≤ 30 cfu/g

Fiecare lot de masti faciale de uz general este livrat numai daca rezultatele analizei microbiologice corespund cerintelor: incarcatura microbiana ≤ 30 cfu/g

Mastile faciale de uz de uz general detin Autorizatie temporara numarul 1674/14.05.2020 emisa de Ministerul Apararii Nationale, Centrul de Cercetare Stiintifica pentru Aparare CBRN si Ecologie.

Descriere

Materiale:

1. Polipropilena - material netesut, 100% polipropilena, de culoare bleu, alba sau verde;
2. Element metalic protejat, pentru fixare la baza nasului (banda pliabila);
3. Snur elastic pentru fixare - poliester cu filament de cauciuc;
4. Cutie cu masti - Cutie din carton imprimata

Materiale suprapuse (structura tri-laminara), dupa cum urmeaza:

1. Netesut SBPP
2. Netesut MBPP
3. Netesut SBPP

- ☐ Numar pliuri: 3
- ☐ Dimensiuni corp masca:
 - Lungime: 175 ± 5 mm
 - Latime (pliata): 95 ± 10 mm
 - Latime (totala): 160 ± 5 mm
 - Lungime piesa nas: 100 ± 10 mm

- ☐ Prindere: cu elastic
- ☐ Termen de valabilitate: Termenul de valabilitate pentru produse este inscris pe cutia individuala (care contine 50 masti) si pe cutia colectiva si este de 5 ani de la data fabricatiei.

INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE:

- ☐ Inainte de a aplica masca, curatati mainile cu o solutie pe baza de alcool sau cu apa si sapun.
- ☐ Se prinde cu mainile, partea inferioara si cea superioara a mastii.
- ☐ Se trage de partea inferioara a mastii pana se deschid pliurile.
- ☐ Se pozitioneaza masca pe fata: se fixeaza pozitia mastii pe nas cu o mana, iar cu cealalta mana se trag elasticele dupa urechi.
- ☐ Se acopera barbia, gura si nasul cu masca si asigurati-va ca nu sunt spatii goale intre fata si masca.
- ☐ Nu se atinge masca in timpul purtarii.
- ☐ Se inlocuieste masca cu una noua imediat ce se umezeste.
- ☐ Scoaterea mastii se face astfel: se apuca masca de elastice (nu se atinge partea din fata a mastii) si se introduce intr-o punga de plastic, care se arunca imediat la un cos cu capac.
- ☐ Se curata mainile cu solutie pe baza de alcool sau cu apa si sapun.

PRECAUTII:

- ☐ A nu se utiliza dupa data de expirare inscrisa pe ambalaj
- ☐ Inainte de utilizare, examinati masca: nu o folositi daca este rupta, prezinta pete sau mirosuri.
- ☐ Depozitati produsele in spatii curate, ventilate si uscate.
- ☐ Umiditatea relativa nu trebuie sa fie mai mare de 80%.
- ☐ Masca e de unica folosinta. Nu reutilizati!
- ☐ Riscul de contaminare cu fluide organice nu este complet eliminat folosind masca faciala de uz general
- ☐ Feriti produsul de umiditate, lumina si caldura!

LIMITARI:

- ☐ Acest produs nu ofera protectie impotriva gazelor toxice / vaporilor toxici
- ☐ Utilizatorul trebuie sa se asigure intotdeauna ca produsul ce urmeaza a fi utilizat este in termenul de valabilitate, este adecvat scopului utilizarii si este utilizat conform instructiunilor. Nerespectarea acestor recomandari constituie un risc pentru sanatatea utilizatorului si a altor persoane.
- ☐ Pentru alegerea corecta a unei masti faciale este necesara definirea clara a scopului pentru care este utilizata.

