

Masca medicala Sinomedic, 3 pliuri, IIR, albastru, 50buc



Pret: 9³² RON (fara TVA)

Disponibilitate: Comanda speciala

Descriere

Masca medicala Sinomedic, 3 straturi, 3 pliuri, eficienta filtrare $\geq 98\%$, set 50 buc/set, albastre

Descriere si avantaje:

- Masca de tip IIR medicala non-sterila
- Material: 2 straturi PP material netesut si 1 strat filtru (meltblown fabric)
- Cu clema nazala
- Marimea produsului: 17.5cm x 9.5cm
- Ambalare: 50 bucati/ cutie
- Temperatura de depozitare: -20°C -40°C
- Valabilitate: 5 ani

Standarde aplicate:

- EN 14683:2019
- 93/42/EEC
- EN ISO 15223-1 : 2016

- EN ISO 10993-1: 2009/AC: 2010
- EN ISO 10993-10: 2013
- EN ISO 14971:2012
- EN ISO 1041: 2008A1: 2013
- EN ISO10993-5: 2009

Prezentare:

- Masca medicala Sinomedic tip IIR, 3 straturi, albastre - 1 cutie carton x 50 bucati

Instructiuni de utilizare:

Inainte de a aplica masca, curatati mainile cu o solutie pe baza de alcool sau cu apa si sapun.

- o Se prinde cu mainile, partea inferioara si cea superioara a mastii
- o Se trage de partea inferioara a mastii pana se deschid pliurile.
- o Se pozitioneaza masca pe fata: se fixeaza pozitia mastii pe nas cu o mana, iar cu cealalta mana se trag elasticele dupa urechi.

Se acopera barbia, gura si nasul cu masca si asigurati-va ca nu sunt spatii goale intre fata si masca.

- o Nu se atinge masca in timpul purtarii.
- o Se inlocuieste masca cu una noua imediat ce se umezeste.
- o Scoaterea mastii se face astfel: se apuca masca de elastice (nu se atinge partea din fata a mastii) si se introduce intr-o punga de plastic, care se arunca imediat la un cos cu capac.
- o Se curata mainile cu solutie pe baza de alcool sau cu apa si sapun.

Precautii:

- o A nu se utiliza dupa data de expirare inscrisa pe ambalaj
- o Inainte de utilizare, examinati masca: nu o folositi daca este rupta, prezinta pete sau mirosuri.
- o Depozitati produsele in spatii curate, ventilate si uscate.
- o Umiditatea relativa nu trebuie sa fie mai mare de 80%.
- o Masca e de unica folosinta. Nu reutilizati! Mastile de unica folosinta sunt de obicei inlocuite la fiecare 4 ore si nu pot fi refolosite.
- o Riscul de contaminare cu fluide organice nu este complet eliminat folosind masca faciala medicala
- o Feriti produsul de umiditate, lumina si caldura!

Limitari:

- Acest produs nu ofera protectie impotriva gazelor toxice / vaporilor toxici
- Utilizatorul trebuie sa se asigure intotdeauna ca produsul ce urmeaza a fi utilizat este in termenul de valabilitate, este adecvat scopului utilizarii si este utilizat conform instructiunilor de

folosire. Nerespectarea acestor recomandari constituie un risc pentru sanatatea utilizatorului si a altor persoane.

- Pentru alegerea corecta a unei masti faciale de uz medical este necesara definirea clara a scopului pentru care este utilizata.

Conditii de depozitare:

- Evitati expunerea directa in soare
- Nu depozitati produsul langa substante toxice
- Pastrati produsul departe de substante inflamabile