


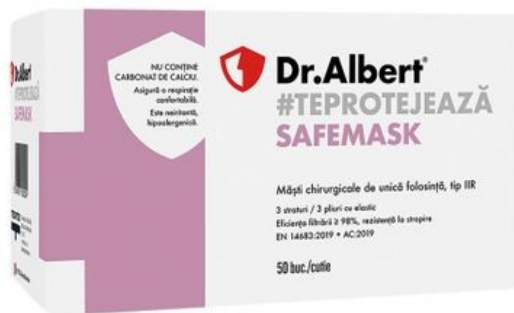

Masca uz medical tip IIR banda 50buc/cutie Dr. Albert

Pret: 5⁷⁶ RON (fara TVA)

Disponibilitate: Comanda speciala



Descriere

Compozitia produsului:

Masca este formata din trei straturi de material textil netesut, 100% polipropilena.

Sistemul de fixare este format din banda metalica, ajustabila pe forma nasului, si snururi/benzi elastice.


Descrierea produsului:

Produsul este dispozitiv medical, Clasa I, nesteril.

Stratul interior are rol filtrant.

Materialele textile folosite sunt compatibile cu pielea: nu contin fibra de sticla, carbonat de calciu sau citotoxine.

mască chirurgicală tip IIR

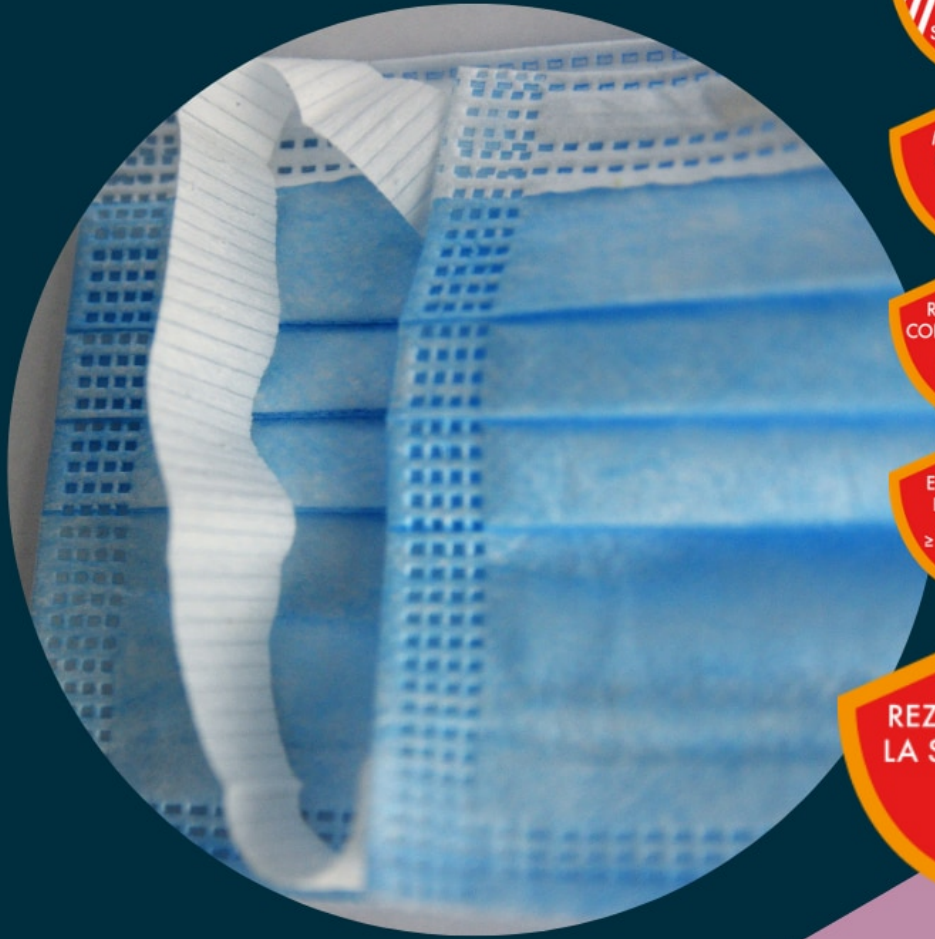

Instructiuni de utilizare:

Înainte de a intra în contact cu produsul, spălați-vă mâinile cu apă și săpun.

Identificați banda metalică de fixare pe nas și orientați masca astfel încât banda să fie poziționată în partea de sus a măști.

Poziționați masca pe față, astfel încât marginea pliurilor să fie orientată în jos.

Așezați masca pe față și duceți snururile elastice după urechi.

Extindeți masca în așa fel încât să acopere gura și bărbia.

După extinderea măști, apăsați banda metalică din zona nasului pentru a fixa masca.

Instructiuni de înlăturare:


Evitati atingerea celor 2 fete ale mastii, manipularea mastii se va face cu ajutorul snurilor elastice.

Prindeti cele 2 snururi elastice si inlaturati masca de pe fata.

Dupa inlaturarea ei aruncati masca folosita.

Dupa aruncarea mastii, spalati-va mainile cu apa si sapun, inainte de a atinge alte suprafete.

**mască chirurgicală
tip IIR**

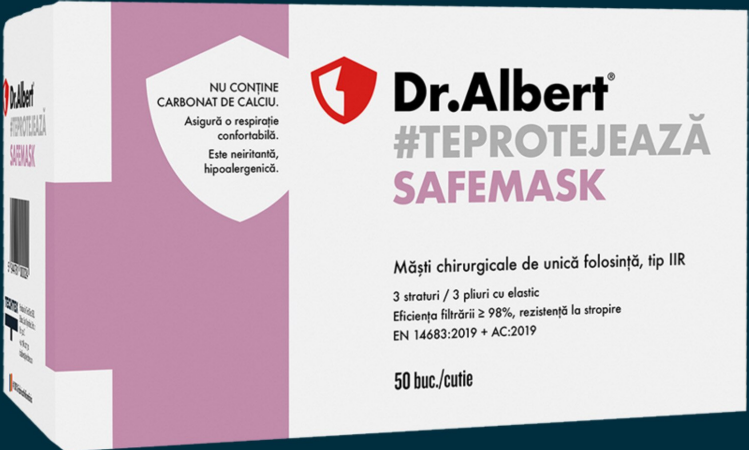

Dr. Albert®
#TEPROTEJEAZĂ
SAFEMASK

NU CONȚINE
CARBONAT DE CALCIU.
Asigură o respirație
confortabilă.
Este neiritantă,
hipoalergenică.

Măști chirurgicale de unică folosință, tip IIR
3 straturi / 3 pliuri cu elastic
Eficiența filtrării ≥ 98%, rezistență la stropire
EN 14683:2019 + AC:2019
50 buc./cutie

- 3 STRATURI
- MATERIAL NETESUT
- RESPIRAȚIE CONFORTABILĂ
- EFICIENȚA FILTRĂRII ≥ 98%
- REZISTENȚĂ LA STROPIRE

Atentionari si recomandari:

Se recomanda ca masca sa fie schimbata o data la 4 ore sau ori de cate ori aceasta s-a umezit sau s-a deteriorat.

Nu se recomanda utilizarea mastii intr-un mediu cu nivel scazut de oxigen sau in timpul somnului.

Se recomanda precautie in utilizarea mastii in cazul persoanelor care sufera de astm sau alte afectiuni respiratorii.

Instructiuni de depozitare:

A se proteja de lumina soarelui, umiditate si praf. Se recomanda depozitarea intr-o zona curata si uscata. Pentru depozitare se recomanda respectarea intervalului de temperatura de -20°C si $+25^{\circ}\text{C}$ si umiditate $<80\%$.

mască chirurgicală tip IIR



